



ダイヤエクール®

DiaEkur

MMS-001


留置針固定用テープ

EOG
滅菌済


◆特長

◆高い視認性と水蒸気透過性

穿刺部を固定するドレッシング部は透明フィルムを使用しており視認性に優れ、水蒸気を通すため長時間使用しても肌が蒸れにくいです。(透湿度2,500g/m²/24h以上)

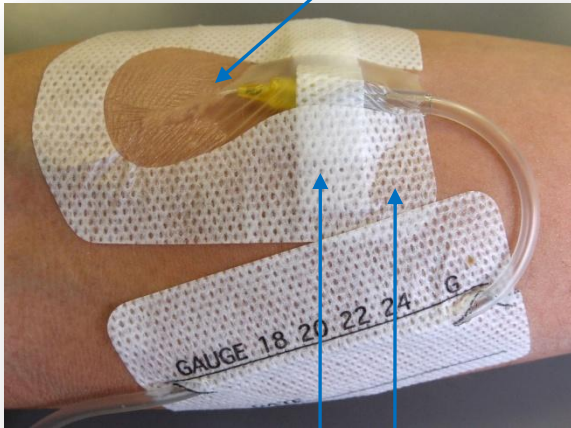

◆皮膚への負担軽減

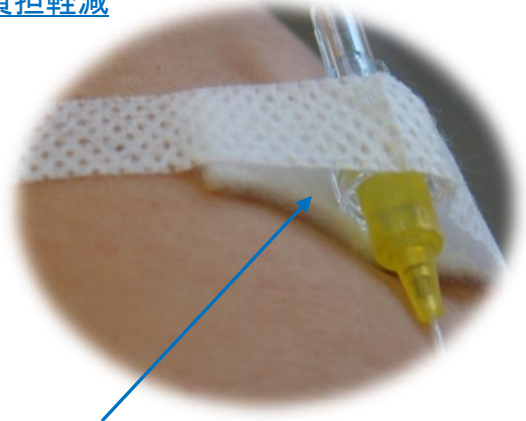

肌にやさしい不織布パッドを使用することでコネクタ部分の皮膚への圧迫を軽減します。

◆しっかりと固定

仮止め用不織布テープとドレッシングで穿刺部を二重に強力に固定し針が抜けたり脱落の心配がありません。

◆記録用&ルート固定ラベル付属




◆製品形態

100枚入り/箱、滅菌個装袋入り

大きな記録用ラベルに使用日時やゲージの大きさを記載し、そのままルート固定に使用できます。

◆ひとりで取扱いが可能に

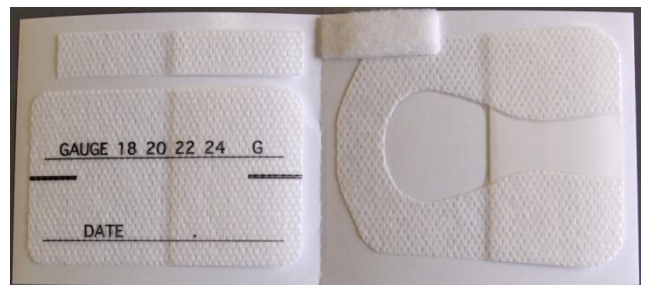

1枚の台紙の上に全ての部品があるので、順番に使用すれば簡単にひとりで留置針固定の処置ができます。




問い合わせ先
三菱製紙株式会社
営業担当 TEL : 03-5600-1476, FAX : 03-5600-1414
総括製造販売責任者: TEL : 075-951-1096, FAX : 075-951-1085

ダイヤエクール®の使用法

DiaEkur

EOG
滅菌済

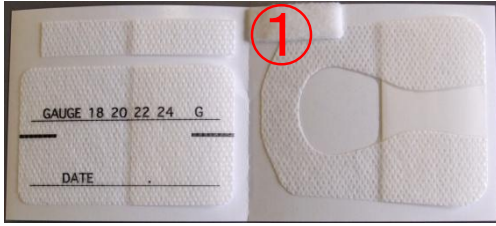

1. 不織布パッドの取り出し

台紙に挟まっている①付属の不織布パッドを取り出す



2. 不織布パッドの装着

不織布パッドをすべり込ませてコネクタの下に貼る。




3. 不織布パッドの装着完了




4. 仮止め用不織布テープを取り出す

台紙上の②仮止め用不織布テープを取り出す

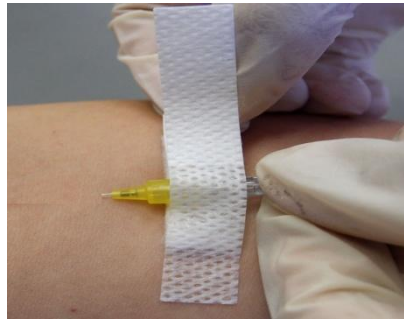


5. 仮止め

仮止め用不織布テープでコネクタ部分固定する。

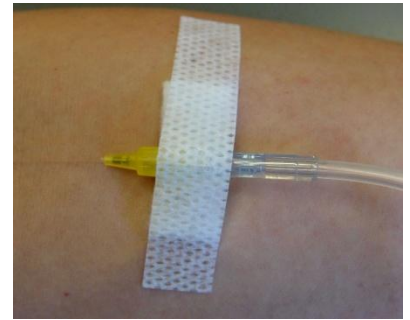

6. 仮止め完了

この時点で手の保持なしで固定できる。

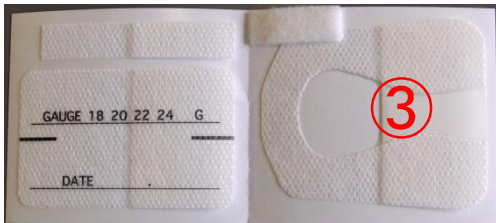

7. ドレッシング材を取り出す

台紙上の③ドレッシング材を取り出す




8. ドレッシング材でのカバー

穿刺部をフィルム中心に合わせて剥離紙を剥がしながら貼る。



9. 固定完了

留置針の固定は完了。

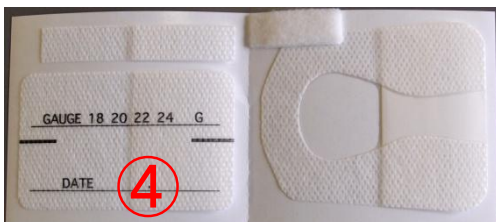

10. 記録用ラベルを取り出す

台紙上の④記録用ラベルを取り出す



11. 記録用ラベルの貼付

記録用ラベルに日付等に記載しルートを固定する。